



** 類別 機械器具 06 呼吸補助器

** 管理医療機器 一般的名称 加温加湿器 JMDN 70562000

販売名「F&P MR700 シリーズ型 加温加湿器」の付属品 (ホースクリップ)


【警告】

- * 患者さんに装着する前に、呼吸回路に漏れやリークがなくベンチレータが正常作動することを適切な試験で確かめてください。
呼吸回路が皮膚に触れないようにしてください。患者さんが火傷する可能性があります。
フィッシャー アンド パイケル ヘルスケア社が承認したアクセサリのみ、ご使用ください。承認されていない他社製のアクセサリの使用は、加湿器の性能と安全性を損なう恐れがあります。
- * フェノール(5%以上)、ケトン系溶剤、ホルムアルデヒド、ハイポクロライト、塩酸化炭化水素、芳香族炭化水素、無機酸、第四アンモニウム化合物を消毒・洗浄・滅菌には使用しないでください。これらの薬剤は、部品に亀裂を起こしたり、チューブ(蛇管)を破損する可能性があります。

【形状・構造等】

1. 構成

ホースクリップ、添付文書

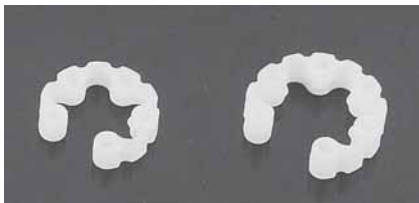

900MR047

900MR042

【性能、使用目的、効能又は効果】

呼吸回路とチューブをまとめる役割を果たします。900MR042は19mmまたは22mmの蛇管用、900MR047は15mmの蛇管用です。

【操作方法又は使用方法等(用法・用量を含む)】

呼吸回路などに接続する前に、破損やひび割れが見られないことを確認してください。

呼吸回路にチューブを沿わせてから、ホースクリップをしっかりと取付けてください。



【使用上の注意】

- * 熟練された医師が使用してください。
病院の感染防止のためのガイドラインに沿って、呼吸回路を交換してください。
塩酸化炭化水素、芳香族炭化水素、無機酸、第四アンモニウム化合物が使用されていた場合、オートクレーブしないでください。

ご使用になる前に、添付文書を良くお読みになってください。この添付文書、および併用される機器の取扱説明書の指示事項を守ってご使用ください。

【作動・動作原理】

呼吸回路とチューブをとりまとめます。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

* 保管温度: -10 ~ +50

* 保管相対湿度: 10 ~ 90% (非結露)

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

< 滅菌・消毒 >

* アセタール製。オートクレーブ(136 で4分、120 で15分)またはEOG(55)可能。

< 日常点検 >

破損やひび割れ等がないことを確認し、必要なら取替てください。

【包装単位】

3個/袋

【主要文献及び文献請求先】

* アイ・エム・アイ株式会社 商品・市場開発部

* 住所: 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14

* TEL: 03-5246-9463

E-mail: support@imimed.co.jp

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

* 製造販売業者の名称: アイ・エム・アイ株式会社

住所: 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12

TEL: 048-988-4411 (代)

輸入先国名: ニューゼaland

* 製造業者名: フィッシャー アンド パイケル ヘルスケア社
(Fisher&Paykel Healthcare Ltd.)