

アラームが作動しないこと、アラームレベルを変更しアラームが正しく働くことを確かめ、アラームレベルを元に戻してください。
オニキスプラスから異音が聞こえないことを確かめてください。
異常が見られる時は使用を止め、直ちに主治医に連絡をとり、適切な処置をとってください。

3. 酸素の追加

酸素は回路、あるいは直接鼻マスクに追加してください。
鼻腔カニューレ、または気管カニューレも酸素の追加に使用できます。

4. 使用中の点検

回路のチューブやコネクタ類がしっかり接続されており、ひび割れや破損がなく、リークがないことを確認してください。
院内の感染防止規定に準じて、回路を定期的に変換してください。

- * 呼吸弁付近の水抜きは、患者さんから回路をはずして実施してください。水の貯留が激しく、呼吸弁チューブ内にも水分の貯留が見られる場合、乾燥した呼吸弁及びチューブと交換してください。呼吸弁が正常に作動していることを確認してください。患者さんの胸の動きと気道内圧インジケータの指示を見て、設定通りの換気動作が行われていることを確認してください。異常な動作音や異臭がないことを確認してください。

【使用上の注意】

分解したり、改造しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・常温常湿による保管。
- ・袋または箱の使用期限を参照してください。

記載方法例

02.2007

使用期限(本例では2007年2月)

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- * 回路(ディスポ)は1度だけの使い捨て回路です。滅菌や再使用しないでください。IMI(株)の指定品のみご使用ください。回路に、ディスポ呼吸回路(5セット)[オニキス](C/N:09402020、リファレンスNo.M-EX0010)またはディスポ回路410[オニキス](10個)(C/N:077 02 010、リファレンスNo.50423900)以外を使用しないでください。

【包装】

M-EX0010...5セット用
EX00101セット用
ディスポ回路1セット/袋
ディスポ回路1セット/袋/箱
呼吸弁(ディスポ).....1ヶ/袋

【主要文献及び文献請求先】

アイ・エム・アイ株式会社 商品・市場開発部
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
TEL:03-5246-9463
E-mail:support@imimed.co.jp

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- * 製造販売業者の名称:アイ・エム・アイ株式会社
住所:〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
- * TEL:048-988-4411
- 輸入先国名:フランス
- * 製造業者名:マリנקロット デベロップメント フランス
(Mallinckrodt Development France)