

保守点検 仕様明細書

【見本、使用禁止】

アイ・エム・アイ株式会社

商品名: 米国 XXXXX社製 XX人工呼吸器

- 実施期間 6ヶ月、1年 or 5,000時間点検、2年 or 10,000時間点検
- 実施内容 保守点検パーツ交換、校正(キャリブレーション)、機能点検、清拭
- 点検内容

点検項目	点検内容	備考
1. 外観チェック	・外装、架台、耐圧ホース、ACケーブル、ダイヤル、フィルター、キャスター	・目視等にて確認
2. 電気的安全性	・接地線抵抗、漏れ電流試験	・リークテスタにて測定
3. UVT	・自己診断試験	・自己診断機能にて確認
4.		
		・本体名板仕様確認
12. 日付/時刻確認	・年月日、時刻表示確認	・目視にて確認
13. アワーメータ	・動作確認及び、点検終了時アワーメータ値確認	・目視にて確認
14. シールチェック	・各種シール類貼付確認 *13種類	・目視にて確認

交換パーツ

コードNo (p/n)	パーツ名	数量	6ヶ月点検	1年点検 or 5,000H	2年点検 or 10,000H
10942210 (11416)	保守点検キット VELA	1	無し	交換	交換
(キットの内訳)					
1054					
		1			
10542009	リング 小	1			
10548002	リング (.414 x .072)	1			
10541009	リング (.4681D x .78)	1			
10542090	ビデオPCB用3Vコインバッテリー	1			
10942030 (16101)	酸素センサー	1		交換	交換
10942040 (21542)	バッテリー 12V 4.5A VELA	4			交換
* 上記以外の交換パーツは別途有料となります。					

点検用治工具

- PF300またはRT200フローアナライザー
- デジタルマルチメーター
- リークテスタ
- モデル肺